

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zu Ihrem Kauf des „Global 360“. Dieses Qualitätsprodukt wurde für Personen entwickelt, die beim Aufwachen besondere Bedürfnisse haben: Es bietet einen einzigartigen, automatisch wiederholenden Countdown-Timer.

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die folgenden Anweisungen durchzulesen **BEVOR** Sie das Produkt benutzen. Ein Verständnis der Funktionen wird Ihnen eine einfache Einstellung und effektiven Gebrauch ermöglichen.

**STROMQUELLE: Netzteil und Universal Adapterstecker liegen bei**

1) Stecken Sie den kleinen Dornstecker des Netzteils (*Ausgang: DC 12V, 1000mA; Eingang 100-240 Volt 50-60 Hz*) in die Buchse an der Rückwand der Uhr mit der Markierung „12V DC Adapter“.

2) Schließen Sie das Netzteil an den Adapterstecker für Ihre entsprechende Stromsteckdose an.

3) Schließen Sie es an eine Stromsteckdose neben Ihrem Bett an.

*Hinweis: „12:00“ wird auf der Anzeige blinken. Wenn Sie die Zeit einstellen, wird die Anzeige nicht mehr blinken.*

**BATTERIESTÜTZSYSTEM: CR2032 Knopfatterie liegt bei**

*Im Falle eines Stromausfalls wird die Uhr weiterhin die Zeit messen sowie die voreingestellten Zeiten für Alarm*

*und Countdown-Timer. Die Anzeige wird nicht benutzt, um Batterien zu sparen.*

*Hinweis: Wenn nach längerfristigen Stromausfällen der Strom wiederhergestellt ist, müssen Sie die Uhrzeit evtl. neu einstellen.*

Um die Batteriestützfunktion zu aktivieren öffnen Sie die runde Batterieabdeckung an der Unterseite der Uhr; drehen Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn und entfernen Sie den Plastikstreifen.

*Hinweis: Batterie bei Bedarf austauschen.*

*Die Lebensdauer der CR2032-Batterie ist etwa 2 Jahre.*

## **EINSTELLEN DER UHRZEIT**

1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**TIME**“ (Zeit).

2) Halten Sie die Taste **SET** (Einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **HOURL** (Stunden), um die Stunden einzustellen.

*Hinweis: Im 12-Stundenform erscheint das gelbe ANZEIGELICHT PM in der oberen linken Ecke der Uhranzeige. Bei einer Zeit nach Mittag (PM) wird das Licht „an“ sein. Bei einer Zeit vor Mittag (AM) wird das Licht ausgeschaltet sein.*

3) Halten Sie die Taste **SET** (Einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **MINUTE** (Minuten), um die Minuten einzustellen.

**WÄHLEN SIE DAS 12-STUNDEN- (AM/PM) ODER 24-STUNDENFORMAT.**

1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**TIME**“ (Zeit).

2) Halten Sie die Taste **SET** (Einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **START/STOP** (Start/Stopp) um das gewünschte Format auszuwählen.

**ALARMMODUS AUSWÄHLEN: Vibration, Ton, oder beides**

Schieben Sie die Taste **ALERT MODE** (Alarmmodus) (3-Wegeschalte an der linken Seite der Uhr) auf die gewünschte Alarmfunktion für Alarm und Countdown-Timer.

**VIBRATION** aktiviert die Bettvibration.

**TON** aktiviert den Ton.

**BEIDES** aktiviert die Bettvibration und den Ton.

Die Lautstärke kann eingestellt werden, wenn Sie die TON-Funktion benutzen.

Schieben Sie die Taste **AUDIBLE** (Ton) oben an der Uhr von „**LOUD**“ (Laut) zu „**SOFT**“ (leise).

**BETT-VIBRATION:**

*Wenn der Alarm bzw. der Countdown-Timer aktiviert ist, wird die Bettvibration pulsierend vibrieren.*

1) Stecken Sie den Mini-Dornstecker des Bettvibrationskabels in die Buchse auf der Rückseite der Uhr mit der Markierung **BEDSHAKER** und legen Sie das Bettvibrationsgerät unter Ihre Kopfkissen oder Ihre Matratze.

2) Schieben Sie die Taste **ALERT MODE** (Alarmmodus) (3-Wegeschalte an der linken Seite der Uhr) auf **VIBRATE** (Vibration) oder **BOTH** (beides).

3) Schieben Sie den Schalter **ALARM/COUNTDOWN TIMER** (4-Positionsschalte an der rechten Seite der Uhr) in die Position **BOTH ON** (beides an).

4) Drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp) um die Vibration manuell zu unterbrechen.

## **WECKER**

- *Eingestellte Weckfunktion(en) (Vibration, Ton, oder beides) wird zur voreingestellten Weckzeit aktiviert.*
- *Aktiviert Wecksignale können manuell unterbrochen werden, indem Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp) drücken, solange die Uhr in irgendeinem **MODUS** ist. (**TIME**, **ALARM** oder **TIMER**) (Zeit, Alarm, oder Timer) wird automatisch nach etwa 20 Minuten stoppen.*
- *Die eingestellte Weckzeit wird weiterhin für tägliche Weckfunktion eingestellt bleiben und kann an Tagen, an denen die Alarmfunktion nicht benötigt wird, über den Schalter **ALARM/COUNTDOWN TIMER** (Alarm/Countdown-Timer) abgestellt werden.*

## **EINSTELLEN DER WECKZEIT**

1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**ALARM**“ (Alarm).

2) Halten Sie die Taste **SET** (einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **HOUR** (Stunden), um die Stunden einzustellen.

*Hinweis: Im 12-Stundenform erscheint das gelbe ANZEIGELICHT PM in der oberen linken Ecke der Uhranzeige. Bei einer Zeit nach Mittag (PM) wird das Licht „an“ sein. Bei einer Zeit vor Mittag (AM) wird das Licht ausgeschaltet sein.*

3) Halten Sie die Taste **SET** (einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **MINUTE** (Minuten), um die Minuten einzustellen.

*Hinweis: Das blaue ALARM-Anzeigelicht (in der linken unteren Ecke der Anzeige) wird aufleuchten. Die Weckzeit wird weiterhin eingestellt bleiben und wird täglich zur gleichen Zeit aktiviert, insofern die Funktion nicht abgestellt oder manuell verstellt wird.*

## **EINGESTELLTE WECKZEIT ÜBERPRÜFEN**

Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**ALARM**“ (Alarm).

*Die Zeitanzeige wird nun die eingestellte Weckzeit anzeigen.*

## **WECKFUNKTION AUSSTELLEN**

An Tagen, an denen Sie nicht geweckt werden möchten, schieben Sie den Schalter **ALARM/COUNTDOWN TIMER** (4-Positionsschalter an der rechten Seite der Uhr) in die Position **CLOCK ALARM** (Wecker) **OFF** (aus) oder

**BOTH OFF** (beide aus).

Die Weckzeit wird weiterhin eingestellt bleiben.

*Hinweis: Das blaue ALARM-Anzeigelicht (in der linken unteren Ecke der Anzeige) wird nicht aufleuchten.*

## **SCHLUMMERFUNKTION BENUTZEN**

Sie können die Taste SNOOZE (Schlummer) drücken, um die Weckfunktion zu unterbrechen. Nach etwa 9 Minuten wird die Weckfunktion wiederholt.

Die kann beliebig oft wiederholt werden.

Nachdem die Weckfunktion auslöst, drücken Sie die Taste **SNOOZE**

(Schlummer), um die Weckfunktion (Ton, Bettvibration, oder beides) zu unterbrechen.

*Hinweis: Das blaue ALARM-Anzeigelicht (in der linken unteren Ecke der Anzeige) wird blinken.*

## **COUNTDOWN-TIMER**

- *Programmieren Sie den Countdown-Timer für eine beliebige Zeit bis zu 23 Stunden 59 Minuten.*
- *Eingestellte Weckfunktion(en) (Vibration, Ton, oder beides) wird aktiviert, wenn der Countdown „0:00“ erreicht.*
- *Aktivierte Wecksignale können manuell unterbrochen werden, indem Sie die Taste START/STOP (Start/Stopp) drücken, solange die Uhr in irgendeinem MODUS ist. (TIME, ALARM oder TIMER) (Zeit, Alarm, oder Timer) wird automatisch stoppen.*

*Hinweis: Die Auto-Stopp-Funktion wird die Weckfunktion nach etwa 30 Minuten automatisch unterbrechen, wenn der Timer für 31 Minuten oder länger eingestellt wird; nach etwa 5 Minuten wenn der Timer für 6-30 Minuten eingestellt ist; und nach etwa 30 Sekunden wenn der Timer für 1-5 Minuten eingestellt ist.*

• **Die programmierte wird Zeitzählung automatisch wiederholt, wenn der Timer „00:00“, insofern dies nicht automatisch ausgestellt wird.**

### **COUNTDOWN-TIMER EINSTELLEN:**

1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**TIMER**“ (Timer).

2) Halten Sie die Taste **SET** (einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **HOURL** (Stunden), um die Stunden einzustellen.

3) Halten Sie die Taste **SET** (einstellen) gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste **MINUTE** (Minuten), um die Minuten einzustellen.

*Hinweis: Das grüne Anzeigelicht **COUNTDOWN-TIMER** (in der rechten unteren Ecke der Anzeige) wird aufleuchten.*

4) Drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp), um die Zählung zu stoppen.

*Hinweis: Das grüne Anzeigelicht **COUNTDOWN-TIMER** wird blinken.*

*Die Anzeige wird während der letzten Minute die zählenden Sekunden anzeigen.*

### **Um den Countdown-Timer zurückzustellen:**

- 1) Drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp), um die Zählung zu stoppen.
- 2) Drücken Sie die Taste **SET** (einstellen) und die zuletzt eingestellt Zeit wird angezeigt.
- 3) Drücken Sie die Taste **SET** (einstellen) und drücken Sie die Taste **HOUR** (Stunden) und **MINUTE** (Minuten), wie oben beschrieben.

### **EINGESTELLTE COUNTDOWN-ZEIT ÜBERPRÜFEN**

- 1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**TIMER**“ (Timer). Die Anzeige wird die Countdown-Zeit anzeigen, die eingestellt wurde bzw. die noch übrig ist.
- 2) Um die ursprünglich eingestellte Zeit zu sehen drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp) und dann die Taste **SET** (einstellen).
- 3) Drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp), um die verbleibende Zeit zu zählen.

### **WIEDERHOLUNG DER COUNTDOWN-ZEIT STOPPEN:**

- 1) Schieben Sie die Taste **SET MODE** (Modus einstellen) in die Position „**TIMER**“ (Timer).
- 2) Drücken Sie die Taste **START STOP**(Start/Stopp) ein Mal ODER, falls die Weckfunktion (Vibration, Ton, oder



beides) aktuell aktiviert ist, drücken Sie die Taste **START/STOP** (Start/Stopp) zwei Mal um den Countdown zu stoppen.

### **COUNTDOWN-TIMER ABSTELLEN:**

Wenn Sie die Countdown-Timer-Funktion nicht benutzen möchten, schieben Sie den Schalter

**ALARM/COUNTDOWN TIMER** (4-Positionsschalter an der rechten Seite der Uhr) in die Position **COUNTDOWN TIMER OFF** (aus) oder **BOTH OFF** (beide aus).

Die Countdown-Zeit wird weiterhin eingestellt bleiben.

*Hinweis: Das grüne Anzeigelicht **COUNTDOWN-TIMER** wird nicht angezeigt.*

### **RÜKSETZEN:**

*Bevor Sie Ihre Uhr zurückschicken, versuchen Sie doch bitte, diese mit der Taste **RESET** (Rücksetzen) zurückzusetzen.*

1) Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um die vertiefte Taste „**RESET**“ (Rücksetzen) auf der Unterseite der Uhr zu drücken, bis die Anzeige leer ist.

2) Wenn auf der Anzeige „**×12:00**“ erscheint, stellen Sie Zeit, Alarm, und Countdown-Timer erneut ein.

### **PFLEGE UND WARTUNG**

„**GLOBAL 360**“ wurde sorgfältig entwickelt und hergestellt, um Ihnen Genauigkeit und Verlässlichkeit zu bieten. Folgende Empfehlungen werden Ihnen bei der

Pflege Ihres Weckers/Countdown-Timers helfen, damit Sie lange Freude daran haben.

Halten Sie die Uhr trocken. Falls sie feucht wird, sollten Sie sie sofort trockenwischen. Flüssigkeiten mit Mineralien können die elektrischen Schaltkreise korrodieren.

Benutzen Sie nur frische Batterien der empfohlenen Art und Größe. Entfernen Sie alte und schwache Batterien. Ansonsten können Chemikalien auslaufen, die die elektronischen Schaltkreise beschädigen.

Behandeln Sie die Uhr sorgsam und mit Vorsicht. Die Schaltkreise und das Gehäuse könnten beschädigt werden, falls Sie das Gerät fallen lassen, was die Funktionsfähigkeit einschränken könnte.

Benutzen bzw. lagern Sie die Uhr nur in einem Umfeld mit normaler Raumtemperatur. Extreme Temperaturen können die Lebensdauer des Elektrogerätes verkürzen und Plastikteile schmelzen oder verzerren. Halten Sie die Uhr fern von Staub und Schmutz, was zu einer frühzeitigen Abnutzung der Bauteile führen kann.

Wischen Sie die Uhr gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab um das neue Aussehen zu erhalten. Benutzen Sie für die Reinigung der Uhr keine scharfen Chemikalien, Lösungs- oder starke Reinigungsmittel.

Eine Veränderung oder Manipulation der inneren Bauteile können zu einer Fehlfunktion führen und setzen die Garantie außer Kraft.

## **1 JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE**

Ihre „GLOBAL 360“ ist garantiert ein Jahr ab dem Original Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Dies ist eine eingeschränkte Garantie und umfasst ausschließlich die Funktionen. Diese Garantie verfällt wenn das Gerät verändert, geöffnet, missbraucht, oder extremen Umfeldern ausgesetzt wurde, für die sie nicht entwickelt wurde, sowie auch im Falle von Reparaturen von einem nicht-qualifiziertem Servicecenter. GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC. behält sich das Recht vor, die Einheit zu ersetzen oder zu reparieren.

Während der Garantiedauer schicken Sie das Produkt mit datiertem Kaufbeleg und in einer sicheren Verpackung, versichert und mit bezahltem Porto zurück.

Nachnahmelieferungen werden nicht angenommen. Bitte legen Sie eine Begründung für die Rücksendung bei sowie Ihre Anschrift und für Porto in den USA USD 9,95 (Scheck, Geldanweisung, Visa, Master Card, American Express, oder Discover).

Für Preise in anderen Ländern setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

## **REPARATUR AUSSERHALB DER GARANTIEDAUER**

Folgen Sie den gleichen Versandanweisungen wie für Reparatur unter Garantiebedingungen. Legen Sie eine

Beschreibung des Problems bei. Wir werden vor jeglicher Arbeit an dem Gerät einen Kostenvoranschlag für jegliche Bauteile und Arbeitszeit, die nicht von der Garantie umfasst wird, zukommen lassen.

### **HAFTUNGSFREISTELLUNG:**

Global Assistive Devices, Inc. ist unter keinen Umständen haftbar für besondere, beiläufig entstandene, indirekte, oder Folgeschäden jeglicher Art, einschließlich jedoch nicht ausschließlich Schäden für Sachverluste, Körperverletzung, Verletzung der Privatsphäre, Unterlassung, Fahrlässigkeit, und jegliche anderen Schäden jeglicher Art, die auf jeglichen Grund entstehen, selbst wenn Global Assistive Devices, Inc. über die Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde. Diese Haftungsfreistellung bezieht sich auf jegliche Schäden oder Verletzungen, unter anderem jedoch nicht ausschließlich auf solche, die durch eine Fehlfunktion des Produktes entstanden. Die Verantwortung für die Auswahl, Sicherheit, und Eignung für jegliches Produkt liegt beim Verbraucher. Umstände oder Konsequenzen auf Grund oder im Zusammenhang mit dem Einsatz oder der Unfähigkeit eines Einsatzes unserer Produkte liegen in der Verantwortung des Verbrauchers. Global Assistive Devices, Inc. kann auf keinsten Weise haftbar gemacht werden.

Falls ein Zubehör mit diesem Produkt benutzt wird, was nicht von GLOBAL hergestellt wurde, so übernimmt GLOBAL keinerlei Haftung für die Funktion oder Fehlfunktion des daran angeschlossenen Produktes bzw. „GLOBAL 360“.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.

Oakland Park, FL USA 33334

[www.GlobalAssistive.com](http://www.GlobalAssistive.com)

**„GLOBAL 360“ ist ein Markenzeichen von GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.**