

VibraLITE® Mini

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO:

Nota: Per impostare qualunque funzione, le cifre che desiderate impostare DEVONO LAMPEGGIARE.

ORA E CALENDARIO Imposta Ora, minuti, secondi e data.

Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "TIME".

Tenete premuto il tasto "SET" per far lampeggiare la cifra delle Ore.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.

Premete il tasto "MODE" per far lampeggiare la cifra dei Minuti.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.

Continuate per impostare i Secondi, il Mese, il Giorno del Mese e l'Anno usando i tasti "MODE" e "ST/STP" come sopra

Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.

PER VEDERE LA DATA: Premete il tasto "ST/STP" nella schermata "TIME".

SVEGLIE: Possono essere programmate fino a 12 sveglie.

Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "ALM".

Tenete premuto il tasto "SET" per far lampeggiare la cifra del numero di Sveglia..

Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare la sveglia che volete impostare ("01"-"12").

Premete il tasto "MODE" per far lampeggiare la cifra delle Ore.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.

Premete il tasto "MODE" per far lampeggiare la cifra dei Minuti.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.

Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni, **O**

PER PASSARE alla sveglia successiva, premete il tasto "MODE" mentre lampeggiano i minuti e quindi premete il tasto "ST/STP".

TIMER CONTO ALLA ROVESCIA: Impostabile fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi. Impostate per avere il Conto alla rovescia ripetuto ogni volta che raggiunge lo zero o s'interrompe.

Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "TMR".

Tenete premuto il tasto "SET" per far lampeggiare la cifra delle Ore.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.

Continuate per impostare minuti e secondi usando i tasti "MODE" e "ST/STP" come sopra

Premete il tasto "MODE" e verrà mostrato REP sullo schermo con le cifre che lampeggiano per "ON" o "-".

Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare On o Off.

Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.

OPZIONI: Impostare Vibrazione, Sonoro o Entrambi

Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "OTP".

Premete il tasto "MODE" e verrà mostrato "VIB" sullo schermo con le cifre che lampeggiano per "ON" o "-".

per off.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare On o Off.

Premete il tasto "MODE" e verrà mostrato "SND" sullo schermo con le cifre che lampeggiano per "ON" o "-".

per off.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare On o Off.

Premete il tasto "MODE" e verrà mostrato "BUTN" sullo schermo con le cifre che lampeggiano per "ON" o "-".

per off.

Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare On o Off.

Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.

CARATTERISTICA BLOCCO:

Evita cambi accidentali alle impostazioni programmate.

Premete contemporaneamente i tasti

"MODE" e "SET" mentre la schermata è in modalità "TIME" per bloccare. Ripetete per sbloccare.



ISTRUZIONI DETTAGLIATE:

MODALITÀ TIME

- ✓ Programma e visualizza ora, minuti, secondi e data.
- ✓ Visualizza la data premendo il tasto "ST/STP". La schermata tornerà automaticamente su TIME

Istruzioni di programmazione della modalità Time:

- 1) Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "TIME".
- 2) Tenete premuto il tasto "SET". Le cifre delle Ore lampeggeranno.
- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora. "PM" sarà visualizzato sulla sinistra della schermata quando l'ora è impostata su PM. Se l'ora impostata è AM, la casella sarà vuota.
- 4) Premete il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 5) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 6) Premete il tasto "MODE". Le cifre dei Secondi lampeggeranno.
- 7) Utilizzate il tasto "ST/STP" per resettare i secondi a zero (00) se necessario.
- 8) Premete il tasto "MODE". Il mese lampeggerà.
- 9) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare il mese. (1-12)
- 10) Premete il tasto "MODE". Il giorno del mese lampeggerà.



1) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare il giorno del mese. (1-31)



2) Premete il tasto "MODE". I numeri dell'Anno lampeggeranno.

3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'anno.

4) Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.

Nota: Quando impostate la Modalità Time, se la programmazione s'interrompe e non vengono premuti tasti per due minuti e mezzo, cesseranno di lampeggiare e le impostazioni mostrate sullo schermo saranno mantenute. Finite di programmare ripetendo i passi 1 e 2 e ruotando attraverso gli altri passi per completare il tutto come richiesto.

MODALITÀ ALLARME

- ✓ Programma fino a dodici sveglie quotidiane.
- ✓ Le sveglie saranno attivate con l'allerta (Vibrazione, Audio o entrambi) che è stato impostato in MODALITÀ OPZIONI.
- ✓ Le sveglie durano circa venti secondi prima di interrompersi automaticamente. Le sveglie attivate possono essere interrotte manualmente premendo una volta il tasto "ST/STP" (per risparmiare batteria).
- ✓ Gli orari delle sveglie programmate suoneranno in base all'orario impostato in modalità TIME.

Istruzioni di programmazione della modalità Sveglia

- 1) Premete il tasto "MODE" fino a che non viene mostrato "ALM" in cima allo schermo. Dopo circa due secondi, verrà visualizzato "OFF". (o se era stato programmato una sveglia in precedenza, sarà mostrata l'ora impostata).
- 2) Tenete premuto il tasto "SET" fino a che i numeri nella casella in basso a destra dello schermo lampeggiano.
- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare la sveglia che volete impostare ("01"-"12").
- 4) Premete il tasto "MODE". Le cifre delle Ore lampeggeranno.
- 5) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.



Nota: "PM" sarà visualizzato sulla sinistra della schermata quando l'ora è impostata su PM. Se l'ora impostata è AM, la casella sarà vuota.

- 6) Premete il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 7) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 8) Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni, O per avanzare alla sveglia successiva, premete il tasto "MODE" mentre i numeri lampeggiano e quindi premete il tasto "ST/STP". Ripetete i passi da 4 a 8.

Nota: Quando impostate la Modalità Sveglia, se la programmazione s'interrompe e non vengono premuti tasti per due minuti e mezzo, cesseranno di lampeggiare e le impostazioni mostrate sullo schermo saranno mantenute. La schermata tornerà automaticamente in modalità Time. Resettate se necessario.

Attivare/Disattivare le sveglie

- 1) Premete il tasto "MODE" fino a che non viene mostrato "ALM" in cima allo schermo. Dopo circa due secondi, verrà visualizzato l'ultimo allarme visualizzato.
- 2) Utilizzate il tasto "SET" per selezionare la sveglia che volete attivare/disattivare.
- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per attivare o disattivare l'allarme selezionato.

Nota: Quando la sveglia è attiva, verrà visualizzato il suo orario. Quando la sveglia è spenta, viene visualizzato "OFF" in cima alla schermata.



Nota: Per disattivare o riattivare TUTTE le sveglie vedete le Istruzioni di Programmazione della modalità OPTION e selezionate OFF o ON per Vibrazione e Suono.

TIMER CONTO ALLA ROVESCIA:

- ✓ Programmate un conto alla rovescia fino a 23 ore, 59 minuti e 59 secondi.
- ✓ Quando il conto alla rovescia raggiunge lo zero (0:00:00) gli allarmi impostati (vibrazione, suono o entrambi) saranno attivati per venti secondi e s'interromperanno automaticamente. Gli allarmi attivate possono essere interrotte manualmente premendo una volta il tasto "ST/STP" (per risparmiare batteria).
- ✓ L'opzione RIPETI può essere ATTIVA ("ON") o INATTIVA ("OFF"). Quando RIPETI è ATTIVO, il conto alla rovescia programmato si ripeterà ogni volta che il tempo raggiunge lo zero (0:00:00).

Istruzioni di programmazione della modalità Conto alla rovescia

- 1) Premete il tasto "MODE" fino a che non viene mostrato "TMR" in cima allo schermo.
- 2) Premete il tasto "MODE" per far lampeggiare la cifra delle Ore.
- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare l'ora.
- 4) Premete il tasto "MODE". Le cifre dei minuti lampeggeranno.
- 5) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i minuti.
- 6) Premete il tasto "MODE". Le cifre dei Secondi lampeggeranno.
- 7) Utilizzate il tasto "ST/STP" per impostare i secondi.
- 8) Premete il tasto "MODE". "REP" (per Ripeti) sarà visualizzato in cima alla schermata e "ON" o "--" per off lampeggeranno nella casella in basso a destra.
- 9) Utilizzate il tasto "ST/STP" per selezionare RIPETI "ON" o "--" per OFF.
- 10) Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.



Nota: Quando impostate la Modalità Conto alla rovescia, se la programmazione s'interrompe e non vengono premuti tasti per due minuti e mezzo, cesseranno di

lampeggiare e le impostazioni mostrate sullo schermo saranno mantenute. Completate la programmazione ripetendo il passo 2 e continuate come necessario. Il tempo di Conto alla Rovescia rimarrà sullo schermo. Premete il tasto "MODE" per ruotare fino alla schermata "TIME" quando volete.

Avviare/Interrompere il timer di conto alla rovescia.

- 1) In modalità Conto alla Rovescia, premete il tasto "ST/STP" per avviare il conteggio. L'icona del conto alla rovescia situata sotto la cifra delle ore nello schermo lampeggerà.



- 2) Utilizzate il tasto "ST/STP" per interrompere il conto alla rovescia.

Verrà visualizzato il tempo rimasto.

Nota: Quando il conto alla rovescia è impostato su RIPETI e l'allarme è attivo, premete due volte il tasto "ST/STP" per interrompere il conto alla rovescia.

- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per riprendere il conto alla rovescia.

Reset rapido del tempo di conto alla rovescia originale.

- 1) Tenete premuto il tasto "MODE" fino a che il tempo di conto alla rovescia precedentemente programmato viene visualizzato sullo schermo.
- 2) Premete il tasto "ST/STP" per riprendere dal tempo precedentemente impostato.

MODALITÀ OPZIONI

- ✓ Gli Allarmi VIBRAZIONE e SUONO possono essere ATTIVI ("ON") o INATTIVI ("OFF"). Gli allarmi ATTIVI saranno attivati dalle sveglie giornaliere pre-impostate, dal conto alla rovescia e dalla pressione del tasto.

Nota: Il tasto Premi Avviso, quando impostato su "ON", identificherà l'impostazione allarme corrente (vibrazione, suono o entrambi) ogni volta che viene premuto il tasto "MODE". Questo permette un controllo rapido per confermare le funzioni di avviso correnti. Il tasto degli Avvisi fornirà un monitoraggio facile per determinare se rimane batteria a sufficienza per alimentare gli avvisi con Vibrazione e Suono.

Istruzioni di programmazione della modalità Option:

- 1) Premete il tasto "MODE" fino a che non viene mostrato "OPT" in cima allo schermo. Dopo circa due secondi, verrà visualizzato "VIB" per la vibrazione.

- 2) Tenete premuto il tasto "SET" fino a che "ON" o "-.-" per OFF lampeggia nel riquadro in basso a destra.



- 3) Utilizzate il tasto "ST/STP" per Attivare o disattivare la vibrazione.

- 4) Premete il tasto "MODE". Viene mostrato "SND" per Suono in cima allo schermo. "ON" o "-.-" per OFF lampeggerà nel riquadro in basso a destra.



- 5) Utilizzate il tasto "ST/STP" per Attivare o disattivare il suono.

- 6) Premete il tasto "MODE". Viene mostrato "BUTN" in cima allo schermo. "ON" o "-.-" per OFF lampeggerà nel riquadro in basso a destra.

- 7) Utilizzate il tasto "ST/STP" per Attivare o disattivare il segnale del Tasto.

- 8) Premete il tasto "SET" per salvare le impostazioni.

Nota: Quando impostate la Modalità Option, se la programmazione s'interrompe e non vengono premuti tasti per due minuti e mezzo, cesseranno di lampeggiare e le impostazioni mostrate sullo schermo saranno mantenute. La schermata tornerà automaticamente in modalità Time. Resettate se necessario.

Panoramica rapida delle impostazioni Modalità Option correnti:

- 1) Premete il tasto "MODE" fino a che non viene mostrato "OPT" in cima allo schermo. Dopo circa due secondi, verrà visualizzato "VIB". Se la vibrazione è attualmente attiva, viene visualizzato "ON" in fondo allo schermo. Se è spento, sarà visualizzato "-.-".
- 2) Premete ripetutamente il tasto "ST/STP" per vedere le altre impostazioni della modalità Option correnti. ("SUONO", "TASTO")

CARATTERISTICA BLOCCO :

- ✓ Blocca l'utilizzo dei tasti "MODE", "ST/STP" e "SET" a programmazione completa. In modalità Blocco, le impostazioni del conto alla rovescia e della sveglia non possono essere cambiati accidentalmente.
- ✓ La visualizzazione della data non viene mostrata in questa modalità.
- ✓ L'interruzione manuale dei Segnali di Avviso (per conservare energia) premendo un tasto funzionerà comunemente.

Premete contemporaneamente i tasti "MODE" e "SET" mentre la schermata è in modalità

"TIME" per bloccare o sbloccare. Quando il Blocco è attivato, l'icona del lucchetto apparirà sullo schermo.



LUCE EL: (RETROILLUMINAZIONE DEL DISPLAY)

Premete il tasto "LIGHT" per accendere la retroilluminazione. La luce rimarrà accesa per circa tre secondi e quindi si spegnerà automaticamente se non vengono premuti altri tasti. La luce rimarrà accesa se in quei tre secondi viene premuto un altro tasto.

BATTERIA:

Sono richieste batterie standard da 3 volt al litio CR1632. Vi raccomandiamo di far sostituire le batterie da una persona qualificata per mantenere l'impermeabilità. La batteria può essere sostituita dall'utente a patto che sia stia attenti nel reinstallare la guarnizione ad O per la resistenza all'acqua. Un piccolo cacciavite (Phillips dimensione 00) è richiesto per rimuovere 6 piccole viti.

Istruzioni complete disponibili su www.vibrallite.com

La durata della batteria dipende dall'utilizzo quotidiano di Vibrazione e Suono nelle sveglie e nelle modalità Conto alla rovescia e dall'uso della luce EL. Esempi: La durata stimata della batteria è di circa 2 anni se viene usata la vibrazione per 20 secondi una volta al giorno sarebbe di circa due anni e mezzo, se la vibrazione è usata 12 volte al giorno.

IMPORTANTI PRECAUZIONI:

Gli orologi VibraLITE non sono progettati per essere indossati durante il nuoto, i tuffi o sotto la doccia.

GARANZIA LIMITATA DI UN ANNO:

Il vostro **VibraLITE® Mini** è garantito come privo di difetti dei materiali o della manodopera per un anno dalla data dell'acquisto. Raccomandiamo di conservare lo scontrino dell'acquisto come prova della data di acquisto. Questa è una garanzia limitata e copre solo le funzioni dell'orologio. Questa garanzia non si applica alla batteria, al cinturino, al case o ai cristalli perché questi oggetti sono soggetti a usura quotidiana. La garanzia è nulla se l'orologio è stato maneggiato, alterato, abusato o soggetto a condizioni estreme per le quali non è progettato, o riparato da persona diversa dal nostro centro di servizi qualificato. Durante il periodo di garanzia, riportate l'orologio con lo scontrino dell'acquisto, in un pacchetto sicuro, assicurato e le cui spese di spedizione siano già state pagate. Nessun pacco C.O.D. (Controllo alla consegna) sarà accettato. Includete una nota che descriva la ragione dettagliata per la restituzione, l'indirizzo dove re-inviarlo ed includete \$10 (assegno, denaro, Visa, Master Card, American Express o Discovery) per le spedizioni e il maneggiamento in America. Le altre nazioni ci contattino per conoscere i prezzi.

RIPARAZIONI:

Prima di mandare l'orologio in assistenza, fate controllare la batteria e/o provate a resettare premendo di nuovo tutti e 4 i tasti assieme, fino a che la schermata orario non si annulla. Resettate premendo di nuovo tutti e 4 i tasti e riprogrammate.

RIPARAZIONI FUORI GARANZIA:

Seguite la stessa procedura per inviarceli e se volete il servizio di garanzia. Assicuratevi di includere una descrizione della ragione per cui viene restituito. Prima di iniziare, le sottoporremo una stima per la sua approvazione e per ogni parte e manodopera non coperta dal governo.

DISCLAIMER:

In nessun caso la Global Assistive Devices, Inc potrà essere ritenuta responsabile per qualunque danno speciale, incidentale, indiretto o conseguente inclusi, ma non limitato a, danni per perdita di proprietà, infortuni personali, perdita di privacy, impossibilità di assolvere ai propri doveri, negligenza e qualunque

altro tipo di perdita, in qualunque modo sia causata, anche se la Global è stata avvisata sulla possibilità di tali danni. Questa Dichiarazione di non responsabilità si applica a qualunque danno o ferita, inclusi ma non limitati a quelli causati da qualunque mancanza di resa del prodotto. La responsabilità per la selezione, la sicurezza e l'appropriatezza di qualunque prodotto rimane del consumatore. Le circostanze o le conseguenze derivanti o in qualunque maniere collegate all'uso o all'impossibilità di usare i nostri prodotti è responsabilità del cliente. La Global Assistive Devices, Inc. non può essere in alcun modo ritenuta responsabile.

GLOBAL ASSISTIVE DEVICES, INC.

Oakland Park FL 33334 USA

www.GlobalAssistive.com

www.VibraLITE.com